

# Demotec Easy Bloc

## Produktinformation / Gebrauchsanweisung

Das innovative System zur Klauenbehandlung

## Productspecification / Direction of use

An innovative system of hoof treatment

## Information du produit / Manuel d'instructions

Un système innovateur perfectionné par Demotec

## Información del producto / Instrucciones







Un sistema innovador perfeccionado por Demotec

## Productinformatie / gebruiksaanwijzing

Het innovatieve system voor hoefbehandeling

## Informazioni sul prodotto / Istruzioni per l'uso

Il sistema innovativo per il trattamento degli zoccoli

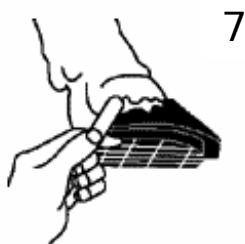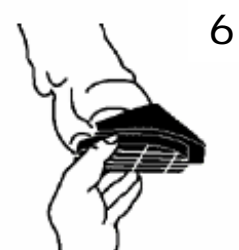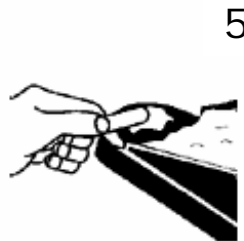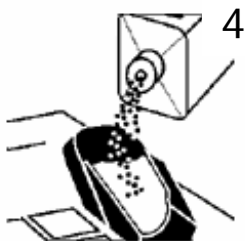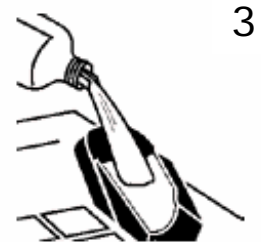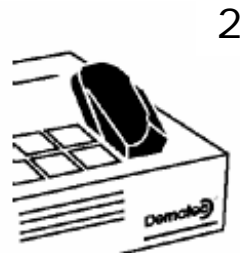

Demotec®

# Produktinformation / Gebrauchsanweisung DEMOTEC EASY BLOC

## An innovative system of hoof treatment

Als einer der weltweit führenden Hersteller von Behandlungssystemen für die Klauenbehandlung haben wir mit **Demotec Easy Bloc** ein neuartiges System entwickelt, das unsere bisherige Produktpalette optimal ergänzt.

In enger Zusammenarbeit mit herausragenden Spezialisten in aller Welt wurden die Wünsche der Anwender nach einem System in die Tat umgesetzt, das sich schnell, einfach und sicher verarbeiten lässt und dabei kostengünstig ist. Besonders den Ideen von Dr. Adrian Gonzalez verdanken wir es, dass die **Easy Bloc's** anatomisch optimal gestaltet und so großzügig dimensioniert sind, dass das System wohl für alle Klauengrößen passt und der Bewegungsablauf der behandelten Rinder nicht beeinträchtigt wird.

Das Unterteil des Bloc's wurde ausreichend dick ausgelegt, dass eine sichere Druckentlastung der erkrankten Klaue gegeben ist. Das weichelastische Oberteil ist so flexibel, dass ein großer Spielraum bei der Anpassung an Klauen mit unterschiedlicher Größe vorhanden ist. Das dünne, elastische Oberteil erleichtert die spätere Entfernung des Bloc's, wenn der Heilungsprozess abgeschlossen ist.

Selbstverständlich gibt es bei Easy Bloc keine scharfen Ecken oder Kanten, die zu unbeabsichtigten Verletzungen der Tiere führen können.

Mit dem neuen Easy Bloc System kann der überwiegende Teil aller Lahmheiten bei Rindern behandelt werden. Es sind Easy Bloc's in normaler und XXL Größe erhältlich. Reicht die Gestaltungsmöglichkeit nicht aus, empfehlen wir als Alternative unsere bewährten Systeme mit Holzklötzchen, Demotec 90 und 95.

### Verarbeitungshinweise

Der skizzierte Ablauf zeigt Ihnen, wie einfach und problemlos die Verarbeitung von Demotec Easy Bloc ist.



1. Die gesunde Klaue wird mit dem Hufmesser oder Winkelschleifer korrigiert und von Schmutz und losem Horn befreit. Besondere Planheit der Klauensohle ist nicht erforderlich. Unebenheiten werden durch die Kunststoffmasse ausgeglichen.



2. Drücken Sie die perforierte Aussparung im Deckel der Schachtel durch und fixieren Sie den Easy Bloc in die richtige Richtung für die Flüssigkeitsmarkierung. Sie haben dadurch die Hände frei für die Handhabung des Kunststoffes.



3. Füllen Sie entsprechend der Markierung 20 ml Flüssigkeit in die Kappe des Bloc's.



4. Geben Sie die doppelte Menge an Pulver hinzu. Ein kleines Loch in der Silberfolie der Pulverflaschenöffnung erleichtert Ihnen die gezielte Dosierung des Pulvers. Streuen Sie das Pulver langsam in die Flüssigkeit bis die Kappe bis kurz unter dem Rand gefüllt ist




5. Sie nehmen den Easy Bloc aus der Aussparung und mischen den Kunststoff leicht durch. Streichen Sie dann mit dem Holzspatel eine dünne Schicht des Kunststoffes auf die nicht benetzte Fläche (Bitte die letzten 2 cm freilassen, damit der Ballenbereich nicht verklebt wird), um einen vollflächigen Klebekontakt mit der Klauensohle sicher zu stellen. Bitte den Easy Bloc nach dem Anmischen direkt platzieren.



6. Den Easy Bloc auf die vorbereitete Klaue stülpen und in die gewünschte Position bringen. Damit sich der Kunststoff gleichmäßig verteilt, den Bloc kräftig andrücken. Durch die vorgegebene Form sitzt der Bloc recht schnell relativ fest an der Klaue, so dass ein unbeabsichtigtes Verrutschen des Bloc's nicht zu befürchten ist.



7. Den überschüssigen Kunststoff mit dem Holzspatel in noch vorhandene Öffnungen zwischen Kappe und Horn verfüllen. Das erhöht die gute Haftung an der Klaue.

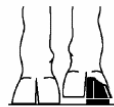

8. Der „Spezialkleber“ verbindet sich intensiv mit dem Kunststoff des Bloc's und haftet gut am Horn. Das sichert eine hohe Festigkeit und gute Haltbarkeit während der Nutzungsdauer. Nach 4 – 5 Minuten (bei 21 °C) ist der Kunststoff völlig ausgehärtet. Das Rind kann die Klaue wieder voll belasten. Die Lahmheit lässt schnell nach!

### Achtung!

Die jeweilige Temperatur hat einen wesentlichen Einfluss auf die Aushärtezeit des Kunststoffes. Die angegebenen Daten gelten für +21 °C. Liegt die Temperatur höher, beschleunigt sich die chemische Reaktion, niedrigere Temperaturen verlangsamen den Ablauf. Als Faustregel kann angenommen werden, dass sich bei einer um 10 °C erhöhten Temperatur die Verarbeitungs- und Aushärtezeiten halbieren und sich bei 10 °C niedrigeren Temperaturen verdoppeln. Zur Vermeidung zu großer Zeitschwankungen bei der Aushärtung sollte der Kunststoff im Winter angewärmt und im Sommer gekühlt werden.

### Allgemeine Hinweise

Der Kunststoff von EASY BLOC sollte:

**An einem kühlen Platz gelagert werden**

**Vor Licht geschützt werden**

**Vor Kindern unzugänglich aufbewahrt werden**

Warnhinweise auf den Behältern genau beachten. EG-Sicherheitsdatenblätter mit weiteren ausführlichen Angaben können Sie anfordern.

### Liefereinheiten Demotec Easy Bloc

4er Packung

500 g Pulver

12er Packung

250 ml Flüssigkeit

36er Packung

Easy Bloc einzeln (links/rechts)